

ABENA Slip Flexi-Fit L-XL4

INCONTINENCE

**ABENA Slip
Flexi-Fit
L-XL4**



110 – 170 cm

5,5 gouttes

M-L1

L-XL1

6,5 gouttes

M-L2

L-XL2

7,5 gouttes

M-L3

L-XL3

8,5 gouttes

M-L4

L-XL4

Flexi-Fit, car ces changes suivent les mouvements du corps.

- ✓ Application simple
- ✓ Ajustement sur-mesure à toutes les morphologies
- ✓ Équilibre cutané préservé

UTILISATEURS

UNISEXE

DÉPENDANT / ALITÉ

INCONTINENCE TRÈS SÉVÈRE

NUIT

Description

ABENA Slip Flexi-Fit est la gamme premium et écolabellisée de changes complets élastiqués, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère à très sévère. L'ajout d'élastiques au niveau de la ceinture permet un ajustement sur-mesure à chaque utilisateur, autour des hanches, au dos et à l'entrejambe, pour offrir une utilisation confortable de jour comme de nuit. Un ajustement sur-mesure signifie une sécurité anti-fuites et une protection cutanée maximisée, puisque cet ajustement permet aux utilisateurs de bouger librement grâce au change qui suit les mouvements du corps. ABENA Slip FLEXI FIT est le choix idéal pour les utilisateurs qui nécessitent un ajustement plus précis.



Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1


La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Extensible et confortable

Les panneaux élastiqués et la ceinture élastiquée assurent un ajustement sur-mesure et confortable, adapté à toutes les morphologies, pour une protection maximale ; même lors de mouvements.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

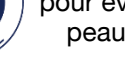

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières (latérales et arrière) et élastiques anatomiques offrent un ajustement parfait et une sécurité à 360°.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA Slip Flexi-Fit L-XL4

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
18	5713571001585	3 105	37 x 17,5 x 29	72	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette (gerbée)	Hauteur palette (cm)
4	5713571001592	13 249	61,6 x 40 x 36,7	12 (24)	125



GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. ABENA Slip Flexi-Fit L-XL4 est à utiliser de nuit pour un utilisateur qui nécessite un ajustement très précis (morphologie complexe, se situe entre 2 tailles, déambule...). Tour de hanches: 110-170 cm

Application position couchée

- 1 Plier le change sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur. Ne pas toucher l'intérieur.
- 2 Placer l'utilisateur sur son côté. Glisser le change "gouttière en main" entre les jambes et de l'avant vers l'arrière. Si nécessaire, placer une serviette entre les genoux pour faciliter la manipulation.
- 3 Déployer la partie arrière du change. Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré. Non applicable avec ABENA Nova.
- 4 Placer l'utilisateur sur le dos. Déployer la partie avant du change en conservant la gouttière entre les jambes.



- 5 Rabattre les panneaux latéraux sur la partie avant et fixer les attaches du bas en les orientant vers le haut pour un bon ajustement autour des cuisses.

- 6 Fixer les attaches du haut en les orientant vers le bas pour un bon ajustement autour du dos.

- 7 Ajuster les bords autour de l'aîne (bords tournés vers l'extérieur).

Application position debout

- 1 Plier le change sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur. Ne pas toucher l'intérieur.
- 2 Glisser le change "gouttière en main" entre les jambes et de l'avant vers l'arrière. Positionner la partie supérieure arrière du change au niveau du coccyx.
- 3 Déployer la partie avant du change en conservant la gouttière entre les jambes. Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré. Non applicable avec ABENA Nova.

Rappel: utilisateur debout, l'utilisation du change complet est-elle justifiée?



- 4 Rabattre les panneaux latéraux sur la partie avant et fixer les attaches du bas en les orientant vers le haut pour un bon ajustement autour des cuisses.

- 5 Fixer les attaches du haut en les orientant vers le bas pour un bon ajustement autour du dos.

- 6 Ajuster les bords autour de l'aîne (bords tournés vers l'extérieur).

Important: Lors du couché, vérifier l'ajustement dans les plis de l'aîne et réajuster les attaches adhésives.

PRODUITS ASSOCIÉS

Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence



Une approche structurée de l'hygiène

Toilette & soins de la peau adaptés

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

